


Wir stoppen Schwitzen.

HIDREX[®] THERAPIE

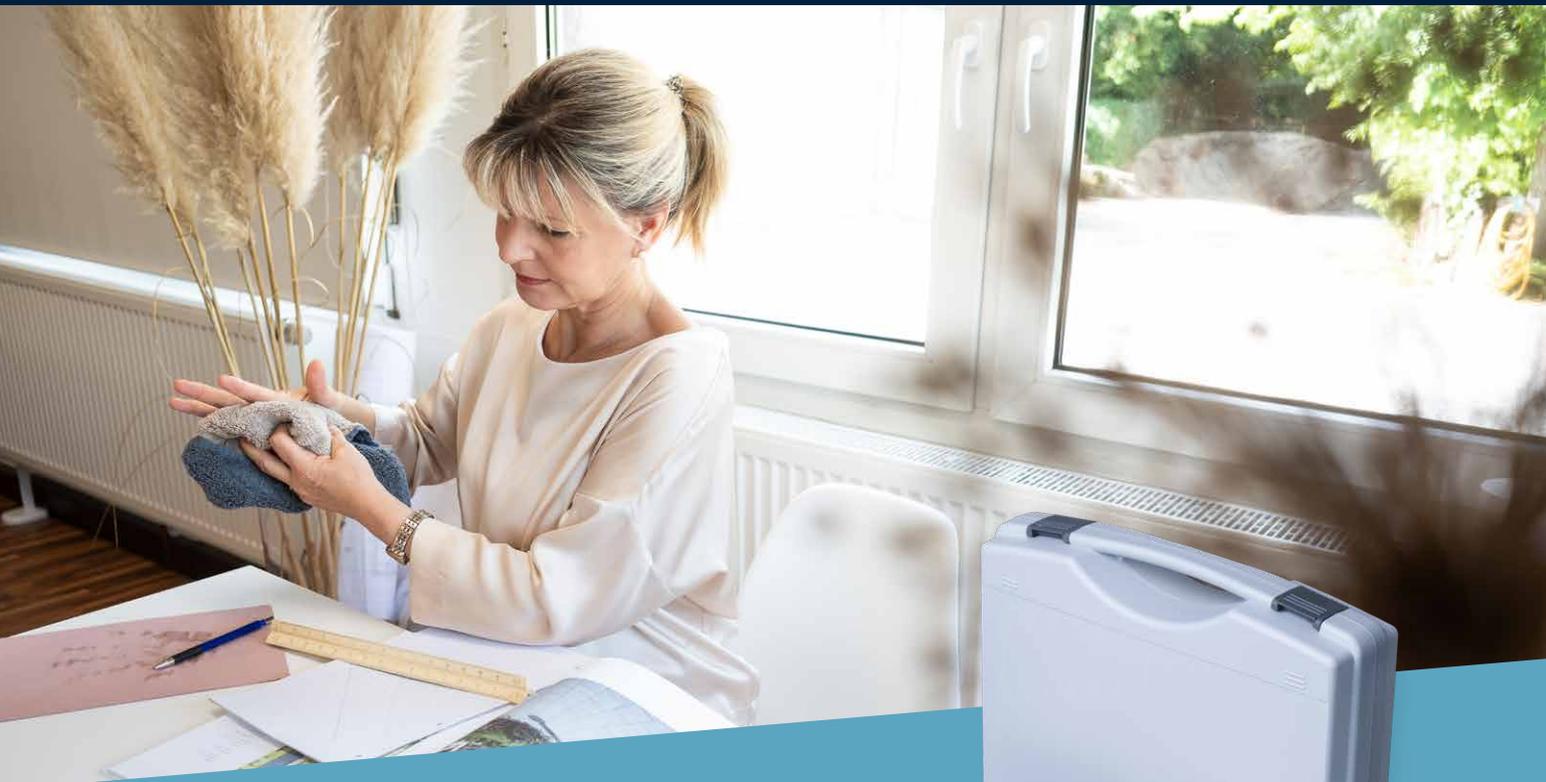

Behandlung gegen übermäßiges Schwitzen!



Hände



Füße



Achseln



Gesicht



classic ION

- Gleich- und Pulsstromverfahren
- Erstellung von Behandlungsprofilen



concept ION

- Automatischer Behandlungsablauf
- Intelligente Erkennung der Therapieparameter



comfort ION

- Variabler Pulsstrom
- Automatischer Polaritätswechsel
- Timer einstellbar

hidrex.at

HIDREX-Stromformen im Vergleich

CE0633



Gleichstrom (GS):

- ⚡ 100% Stromabgabe, keine Pause
- + höchste Effektivität/Wirkung
- starkes Stromempfinden, Anwendung in sensiblen Hautbereichen oder für Kinder oft nicht möglich
- ➔ **Therapie der Füße**

Pulsstrom (PS):

- ⚡ 60% Puls und 40% Pause
- + niedriges Stromempfinden
- durch Pausenzeiten etwas weniger effektiv, Anwendung bei starker Hyperhidrose teilweise nicht ausreichend
- ➔ **Therapie von sensiblen Hautbereichen**

Variabler-Pulsstrom (VPS):

- ⚡ Pulsbreite verstellbar (70% / 80% / 90%)
- + Das Beste aus GS und PS, hohe Effektivität ohne Reizempfinden, optimale Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und Empfindungen
- ➔ **Therapie aller Bereiche; insbesondere zur Behandlung der Hände oder von sensiblen Hautbereichen und Kindern**

Variabler-Pulsstrom (VPS): Hohe Effektivität kombiniert mit minimalem Reizempfinden



Die obige Abbildung zeigt, wie sich die Behandlungseffektivität mit der steigenden Pulsbreite erhöht.

| Parameter | classic ION | concept ION | comfort ION | connect ION |
|---------------------------------|----------------|--|-------------|--------------------|
| Gleichstrom (GS) | | ja | | |
| Pulsstrom (PS) | | ja | | |
| Variabler-Pulsstrom (VPS) | nein | ja | | und Kinder |
| Automat. Polarisierungswechsel | | nein | | ja |
| Programmierbare Profile | 3 | nein, 2 Modi | | 3 |
| App Konnektivität (Android) | | nein | | ja, Bluetooth |
| Erkennung der Therapieparameter | nein | ja, automatisch Dosis, Stromart, Dauer | | nein |
| Therapiedosis | digital 4-60 V | 8 Level | | digital 4-60 V |
| Therapie-Timer | | ja, digital | | |
| Behandlungszeit | 15 Min. | automatisch (10-20 Min.) | 1-60 Min. | 1-30 Min. über App |
| Anti Schock Elektronik (ASE) | | ja | | |
| Übertherapieschutz | | ja | | |
| Eintauchüberwachung | | ja | | |
| max. Leistung | | 60 V / 30 mA | | |
| Stromversorgung | | 110-240 V~; 50-60 Hz | | |
| Abmessungen | | Steuergerät: 190 x 137 x 49 mm (BxTxH) | | |
| Gewicht | | Steuergerät: 0,4 kg | | |

Zubehör

Elektroden

Standard: Aluminium-Elektroden passend für Wannen und Kofferschalen (Hand-/Fußbehandlung) Wir empfehlen den Einsatz dieser Elektroden aus anti-allergischem Aluminium, wenn Sie an einer Nickel- oder Chromallergie leiden.

Optional: Edelstahl-Elektroden passend für Wannen und Kofferschalen (Hand-/Fußbehandlung) Diese hochwertigen Elektroden aus langlebigem Edelstahl sind leichter zu reinigen. Es kommt zu weniger Kalkablagerungen und Verunreinigungen. Außerdem ist im Vergleich zur Aluminiumvariante das Risiko von Verkratzungen oder Verfärbung deutlich geringer.

Abdeckung der Elektroden werden benötigt, damit ein direkter Hautkontakt mit dem Metall der Behandlungselektroden bei der Behandlung der Hände oder Füße verhindert wird.

Standard: Therapiegitter Die Gittermatten aus Kunststoff sind besonders pflegeleicht, gut zu desinfizieren und strapazierfähig.

Optional: Behandlungstücher Die Frottiertücher aus 100% Baumwolle sind besonders angenehm für die Haut und für die Waschmaschine geeignet.

Ergowannen Bei regelmäßigem Gebrauch zu Hause oder in der Praxis empfehlen wir, insbesondere bei der Therapie der Hände, den Einsatz der Ergowannen. Die ergonomisch geformten Wannen bieten eine optimale Auflagefläche für die Unterarme und eine bequeme Sitzhaltung bei der Therapie der Hände.



Set Duo Bei gleichzeitiger Therapie der Hände und Füße mit Hilfe des Sonderzubehörs Set DUO benutzen Sie die Kofferschalen für die Behandlung der Füße und die ergonomischen Behandlungswannen für Ihre Hände.

Zubehör zur Achselbehandlung Die speziellen Applikatoren zur optimalen Behandlung der Achseln werden alternativ zum Zubehör für Hände oder Füße eingesetzt.

Standard: Set AX Silikon-Elektroden Die modernen und leichten Silikon-Elektroden sind im Applikator fest integriert und bieten hohen Tragekomfort.

Optional: Set AX Metallelektroden Die langlebigen, anti-allergischen Aluminium-Elektroden bieten einen hohen Wirkungsgrad.

Gesichtsmaske Mit dieser speziellen Silikon-Elektrode, inklusive flexibler Kopf-Bänderung und austauschbarer Schwammplatte, werden die Kontaktflächen im Gesicht effektiv behandelt.

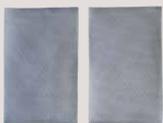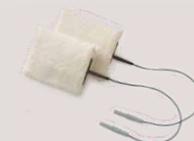

lonto-AT_A4_08-2024

HIDREX
THERAPIE

HIDREX GmbH
Otto-Hahn-Str. 12
42579 Heiligenhaus
T +49 (0) 2056 / 9811-0
info@hidrex.de
hidrex-therapie.de

Vertrieb in Österreich durch:

MTP e. U. Andreas Peters MSc. MBA
Dr. Holter Str. 4, A-4713 Gallspach
+43 (0) 676 7400135 (Service-Telefon)
+43 (0) 664 2175002 (Telefon)
+43 (0) 7248 62814 (Fax)
andreas.peters@medizintechnik-peters.at
www.medizintechnik-peters.at

MTP
medizintechnik peters

